

د ډکو متيازو د نمونو د راټولولو کټ لپاره لارښوونې

مهم: مهرباني وکړئ ټول لارښوونې ولولئ او تعقيب يې کړئ.
احتياط: په ټيټونو کې شته محلول زهرجن دي، مه يې څښئ

تاسو ته د راټولولو کټ درکړل شوی چې تاسو سره به په اسانۍ سره د ډکو متيازو د نمونې راټولولو کې مرسته وکړي. دا لارښوونې به تاسو سره د کټ کارولو کې مرسته وکړي. دا به لابراتوار سره مرسته وکړي چې ښه دنده ترسره کړي او د قيمتي تکرار ازموينې مخه ونيسي.

دا کټ د 1، 2، يا 3 ټيټونو څخه جوړ دی. په ټيټونو کې ممکن مایع وي يا نه وی مهرباني وکړئ په ياد ولرئ چې د مایع او مایع پرته ټيټونو د راټولولو لپاره جلا لارښوونې شتون لري. مایعات زهرجن دي. هغه مه څښئ. هغه د ماشومانو له لاسرسۍ لرې وساتئ.

تاسو بايد د هرې نمونې ټولګه په جلا ټيټوب کې ځای په ځای کړئ. مهرباني وکړئ د 12-24 ساعتونو لپاره د هر ډکو متيازو راټولولو تر مينځ وخت ورکړئ.

مخکې له دې چې پيل شي، مهرباني وکړئ لاندې يادونه وکړئ:
په نمونه يا د راټولولو په کانتينر کې متيازې مه کوئ.
په ټيټونو کې ادرار مه کوئ.
نمونه مستقيم ټيټوب ته مه انتقالوي .
نمونه تشناب ته مه انتقالوي .
لکه څنګه چې لاندې لارښوونه شوې ده نمونه راټوله کړئ.
د هرې نمونې راټولولو تر منځ د 12-24 ساعته وخت ورکړئ.

1. کله چې د نمونې راټولول پيل کوي، نو مهرباني وکړئ په ياد ولرئ چې ډکې متيازې په مستقيم ډول چمتو شوي شيشې ته نشي ليردول کيدی. پرځای يې بايد ډکې متيازې يو پاک، وچ کانتينر ته انتقال شي. د مثال په توګه، تاسو کولی شئ يوه لويه پلاستيکي کڅوړه د کثافاتو په ټوکړۍ کې واچوئ ترڅو نمونه ونيسيا نارينه يو لوی پاک کانتينر يا شيشي بوتل وکاروي. مهرباني وکړئ په ياد ولرئ: متيازې نشي کولی د دې نمونې سره ګډ شي.

2. کله چې ډکې متيازې پاک، وچ کانتينر ته انتقال شي، هغه ټيټوب چې مایع لري خلاص يې کړئ. د راټولولو چمچه په کارولو سره چې د ټيټوب په پوښ کې ځای پر ځای شوی ده (يا د لرګيوسخه جوړه وسيله، که چېرې چمتو شوي وي)، د ټيټوب په اوږدو کې د هغو سيمو څخه چې وينه لرونکي، ياخړاوبه ښکاري، په ټيټوب کې ځای پرځای کړئ ترڅو چې محتويات سور کړنې ته پورته شي. که ډکې متيازې (کلکې) شوي وي، نومهرباني وکړئ هڅه وکړئ د هرې پای او منځ څخه کوچنۍ اندازه نمونه کړئ.

3. د ټيټوب په منځ کې مواد د چمچه يا د لرګيو وسيلې سره خه مخلوط کړئ، بيا سريوڅ په کلکه وتړي او ټيټوب په کلکه سره وخورئ ترڅو چې مواد ښه مخلوط شي.

4. 1، 2 او 3 لارښوونې تکرار کړئ يوازې دهر ټيټوب لپاره چې مایع لري. د تکرار کولو دمخه، مهرباني وکړئ ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو د نمونې راټولولو ترمنځ 12-24 ساعته وخت ورکړئ. دا شيشې د خونې په حرارت کې ذخيرې کړئ.

5. که چېرې د چمتو شوي ټيټونو څخه په يو کې مایع نه وي، دا د پورته په څير د ډکو متيازو سره د سرې کړنې پورې ډک کړئ، مګر دا ټيټوب مه مخلوطوي. يوازې دا سپين سر پوښه شيشه يخچال کړئ. لکه څنګه چې پورته يادونه وشوه، نور ټول بوتلونه د خونې په حرارت درجه کې ذخيرې کړئ.

6. د غوښتل شوي پېژندنې معلوماتو سره په ټيټونو کې ليبلونه په ښه کړئ. همدارنګه باکس په ليبل کې چيک کړئ کوم چې د راټولولو په وخت کې د نمونې په څير ښکاري (انځور وګورئ).

7. د ټولوشيشو سريوڅونوچيک کړئ ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په کلکه تړل شوي دي.

8. خپل لاسونه په ښه توګه ومینځئ. که چیرې د ټیوبونو څخه کوم مایع ستاسو په پوټکي یا ستاسو سترګو کې راشي، د ډیرو روانو اوبو سره یې ومینځئ. که خارښت وده وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړئ.

9. وروسته له دې چې ټولې نمونې راټولې شي، په کڅوړه یا کارتن کې یې د ډاکټر یا لابراتوار ته د سپارلو لپاره ځای په ځای کړئ. په کارتن یا کڅوړه کې لیبل د اړین معلوماتو سره نښه کړئ لکه ستاسو نوم، د زیرون نېټه، جنسیت، او د کور پته.

10. د راټولولو کټ بیرته خپل ډاکټر یا لابراتوار ته ورکړئ.

که وخورل شی: 2-4 ګیلاسه اوبه وڅښئ او سمدلاسه د بېرني مرکز، د زهرو معلوماتو مرکز سره اړیکه ونیسئ، یا د طبي پاملرنې ترلاسه کولو لپاره ډاکټر ته مراجعه وکړئ. هغه ټیوب څخه چې تاسو وڅښکو خوندي یې کړئ: د لیبل معلومات به د مناسب طبي درملنې ټاکلو لپاره ګټور وي.